

N-system  
かんたん！  
設定手順書

2014. 10版



# もくじ

※ オレンジ枠の項目は必ず設定しましょう。

FeliCa対応の活動量計を利用する場合は、青枠の項目も設定しましょう。

※ 詳しい設定手順については、「N-system 操作マニュアル 事前準備編」をご参照ください。

N-system ご利用前のチェックリスト

P. 2

N-system ご利用ステップ

P. 3

**Step 1** 活動量計のデータを取り込めるようにしましょう P. 4

**Step 2** パソリの設定をしましょう①～③

P. 5～7

**Step 3** N-systemにログインしましょう

P. 8、9

**!** 困った時は

P. 10、11

# N-system ご利用前のチェックリスト

● N-systemを始める前に、次のものが揃っているかチェックしましょう。

は必須、 は対象者のみ。

## パソコン



Windows搭載パソコンである。



ブラウザ(  )を使ってインターネットが利用できる。

## 活動量計



※上図はテルモ社製「メディウォーク™」

## プリンタ



## FeliCaリーダー(PaSoRi -パソリ-)

※FeliCa対応の活動量計を使用の場合。



パソリの型番は「RC-380」である

※型番は外箱またはパソリの背面シールに記載されております。

※パソリをお持ちでないまたは型番が異なる場合は、活動量計の値を手入力して、ご利用いただけます。

# N-system ご利用ステップ

※  は必須、  は任意です。メディウォークを使わない方・計測データをご自分で入力する方は、Step3から設定してください。

## Step1 活動量計のデータを取り込めるようにしましょう ➡ P. 4 へ

FeliCa対応の活動量計の場合、計測データをパソコンに取り込むことができます。  
ここでは、取り込みに必要なドライバ(ソフトウェア)のインストールについて説明いたします。

## Step2 パソリの設定をしましょう①～③ ➡ P. 5～7 へ

FeliCa対応の活動量計のデータを受け取る機器(パソリ)の設定をします。①と同じように専用ドライバをパソコンにインストールします。

## Step3 N-systemにログインしましょう ➡ P.8、9 へ

N-systemのログインについて説明いたします。はじめてご利用の場合、ビューアーと呼ばれる専用ソフトのインストールが自動で始まります。

## 困ったときは ➡ P. 10、11 へ

インストールができない、違うソフトをインストールしてしまった、インストールが途中で終了してしまったなど、何か困ったときは本項をご参照ください。

# Step 1 活動量計のデータを取り込めるようにしましょう

※文中の「\*\*\*」は任意の文字が入ります。お使いの活動量計の種類により文字は異なります。

- ① 「nssystemcsv\*\*\*」ファイルをパソコンのデスクトップに保存します。  
※「nssystemcsv\*\*\*」ファイルの入手方法は、N-systemのご契約内容により異なります。ご契約内容を確認の上、ファイルを入手してください。



- ② 「nssystemcsv\*\*\*」ファイルをダブルクリックします。  
デスクトップ上に「nssystemcsv\*\*\*」フォルダが作成されます。



- ③ 「nssystemcsv\*\*\*」フォルダをダブルクリックします。  
「nssystemcsv\*\*\*」および「setup」ファイルがあるかチェックします。



- ④ 「setup」ファイルをダブルクリックします。  
これでFeliCa対応の活動量計の、計測データ取込みドライバの設定は完了です。  
※設定完了後は、「nssystemcsv\*\*\*」ファイル および 「nssystemcsv\*\*\*」フォルダは削除してください。

## Step2 パソリの設定をしましょう①

- はじめに、パソリ用のドライバをホームページより入手します。

① パソコンの「Internet Explorer(インターネットエクスプローラ)」アイコンをクリック  
またはダブルクリックします。 ※Windows8以降はデスクトップモードに切替えてから行ってください。



② Google・Yahoo!などで「sony felica ドライバ」と入力し、検索ボタンをクリックします。



sony felica ドライバ



③ 検索結果一番上のリンクをクリックします。  
「Sony Japan|FeliCa|個人のお客様|ダウンロード|NFCポート…」

[Sony Japan | FeliCa | 個人のお客様 | ダウンロード | NFCポート ...](#)

[www.sony.co.jp/Products/felica/pcrw/fsc\\_dl.html](http://www.sony.co.jp/Products/felica/pcrw/fsc_dl.html)

NFCポートソフトウェア(旧FeliCaポートソフトウェア)は、FeliCaポート/パソリで動

④ 「NFCポートソフトウェア(旧FeliCaポートソフトウェア)」  
枠内の「ダウンロード」をクリックします。

NFCポートソフトウェア

NFCポートソフトウェア(旧FeliCaポートソフトウェア) (Ver5.3.31 / 約21 MB / 2013.10.17)




インストールガイド

次のページへ


## Step2 パソリの設定をしましょう②

- 次に、パソコンにパソリ用ドライバをインストールします。


⑤ ポップアップ表示の「保存」横の▼をクリックし、「保存して実行する」をクリックします。

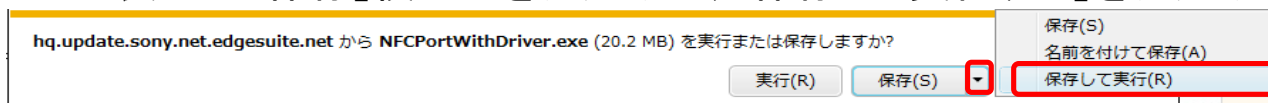

⑥ 「はじめに」→「使用許諾契約」→「インストール先の選択」→「ファイルコピーの開始」の順で画面が表示されます。すべて「次へ」をクリックします。  
※使用許諾契約は「同意します」をクリック後に、「次へ」をクリックします。

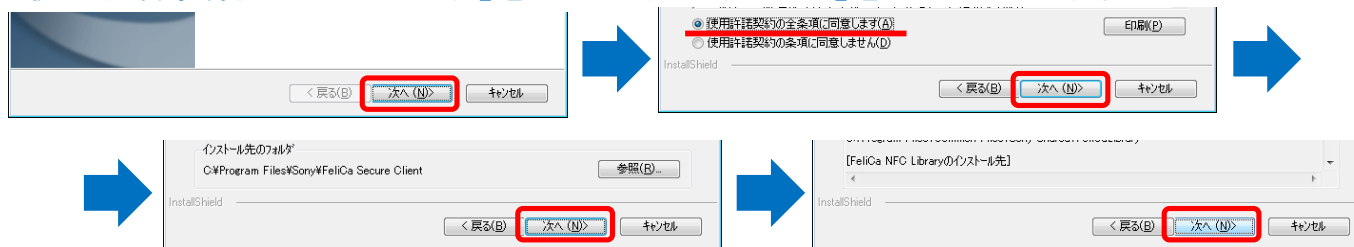

⑦ セットアップ ステータスが表示されたらそのまま待ちます。「完了」ボタンが表示されたらボタンをクリックします。

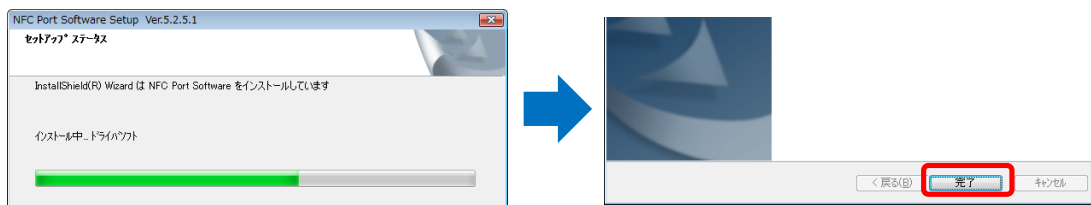


次のページへ

## Step2 パソリの設定をしましょう③


- パソリを接続して設定を反映させたら完了です。

⑧ パソコンのUSBポートにパソリを接続します。

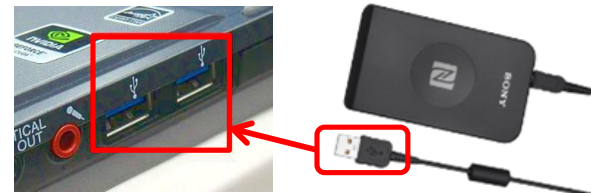


⑨ 「使用許諾契約」が表示されます。「同意します」をクリックし、「次へ」をクリックします。  
その後、インストール画面が表示されますので、そのまま待ちます。  
※ ⑥⑦と同じような画面が表示されます。

⑩ 再起動の画面が表示される場合は、「今すぐ再起動する」をクリックしパソコンを再起動します。  
※ 再起動する前に、開いているファイルやソフトをすべて閉じてください。  
※ パソリは抜かないでください。

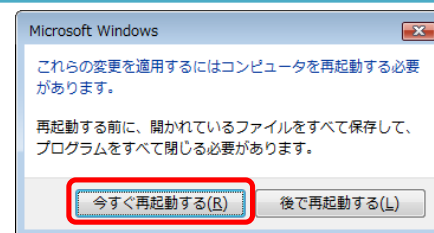

⑪ 「新しいハードウェアの検出」画面が表示されたら設定完了です。「閉じる」をクリックします。

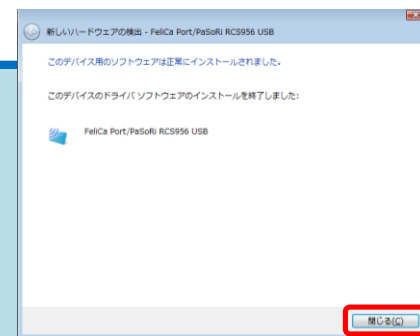



## Step3 N-systemにログインしましょう

- はじめてN-systemをご利用の場合、ビューアーのインストールが始まります。

① パソコンの「Internet Explorer(インターネットエクスプローラ)」アイコンをクリックまたはダブルクリックします。 ※Windows8以降はデスクトップモードに切替えてから行ってください。



② アドレスバーに、N-systemのURL(サイトのアドレス)を入力し、「→」をクリックします。

- ※ URLについては、ご契約情報をご確認ください。
- ※ URLの入力に間違いがないか、ご確認ください。




③ A 自動ログイン対象の方

画面が空白(何も表示されていない画面)で表示されます。そのまま次頁④へお進みください。

③ B 上記以外の方

N-systemのログイン画面が表示されます。ユーザーID・パスワードを入力し、「login」をクリックします。

- ※ ユーザーID・パスワードはご契約情報をご確認ください。

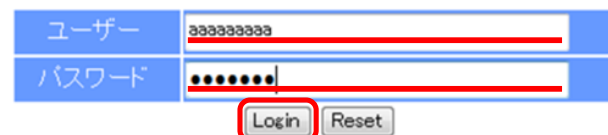


次のページへ

# Step3 N-systemにログインしましょう

- ④ ポップアップおよび画面が表示されます。  
「インストール」→「インストールする」をクリックします。



- ⑤ ビューアーのインストールが始まります。  
そのまま待ちます。

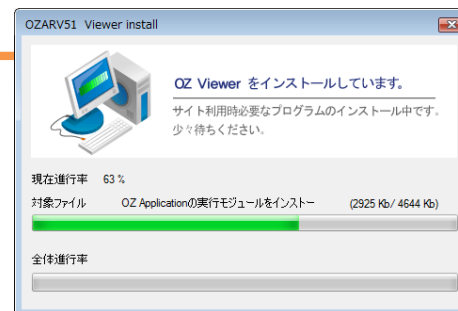

- ⑥ 「このWebサイトは…」ではじまるポップアップが数回表示されます。それぞれ「許可」をクリックします。






- ⑦ ビューアーのインストールが終わり、N-systemの各サービス画面が表示されればOKです。

# ! 困ったときは

## 1. パソリに付属しているCDのソフトウェアをインストールしてしまった。

CD内にはN-system利用時に不要なソフトが含まれています。  
以下の方法で、不要なソフトが自動的に起動しないように設定します。

- ① タスクバー(パソコン画面下部の帯)の右下、 アイコンを右クリックします。
- ② メニューが表示されたら、「オプション設定」をクリックします。
- ③ オプション設定画面が表示されます。「全般」の1番目の項目をチェックをオン、次の2番目の項目のチェックをオフにします。最後に「OK」をクリックします。
- ④ 再び  アイコンを右クリックし、メニューを表示します。
- ⑤ 「終了」をクリックします。自動起動のオフとソフトの終了設定の完了です。

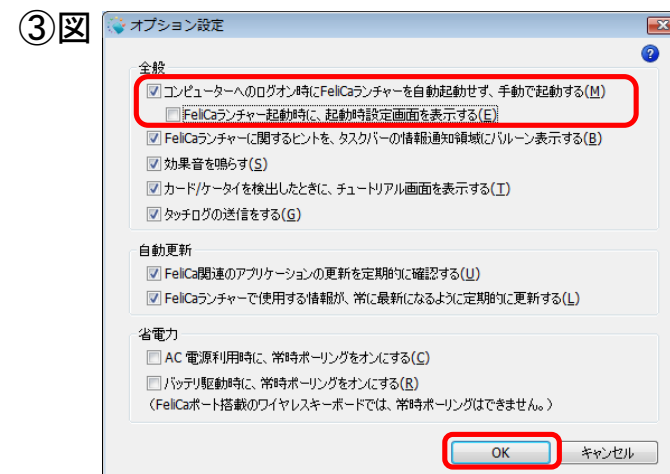

## 2. FeliCaポート内蔵のパソコンを使用している。

Step2の設定をした後、内蔵のFeliCaポートを無効にします。  
FeliCaポートの無効化設定については、SONYのウェブサイトに掲載されている  
設定手順をご覧ください。

<FeliCaポート無効化の設定ページ(URL)>

<http://www.sony.co.jp/Products/felica/consumer/support/faq/detail/249.html>

※ウェブサイト内の“FeliCaポート内蔵パソコンに「RC-S380」を接続する場合”  
(赤線部分)をクリックしてください。【設定手順】のページが表示されます。

※【設定手順】の **2** のみ実施してください。



# ! 困ったときは

## 3. ビューアーのインストールができない。

以下の手順にそって、ご利用環境をご確認ください。

ご利用の端末はパソコンですか？  
(携帯電話・スマートフォン・タブレットでない)

いいえ

N-systemはパソコン用のサービスです。携帯電話・スマートフォン・タブレットなどは現在ご利用いただけません。

はい

Windowsパソコンですか？



いいえ

N-systemは、Windows環境のパソコンでのみご利用いただけます。  
※ただし、Windows RT はOSの仕様によりご利用いただけません。  
※Windows8以降はデスクトップモードに切替えてご利用ください。

はい

ブラウザはInternetExplorerですか？



いいえ

N-systemへは、InternetExplorerよりアクセスしてください。

はい

N-systemのURLは正しく入力されていますか？

いいえ

正しいURLを入力し、再度N-systemへアクセスしてください。  
※特に、英字スペルのミス、「https://…」の「s」の入力忘れにご注意ください。

はい

パソコンの設定変更ができる権限をお持ちですか？

いいえ

お使いのパソコンの管理者へご相談ください。その際、管理者へ「N-system 操作マニュアル 事前準備編」をお渡しください。

不明

はい

「N-system 操作マニュアル 事前準備編」P.3～9をご覧ください。